

Malem Enuresis Alarm

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare l'allarme per Enuresi notturna Malem MO3 assicurarsi di aver rimosso la pellicola bianca posta a protezione della batteria (vedi retro dispositivo) e della Easy- Clip.

Una volta che le pellicole protettive sono state rimosse, l'allarmino è pronto per l'uso.

L'immagine sottostante è volta alla spiegazione dell'allarmino Malem nelle sue 3 singole componenti, ognuna delle quali riporta il nome in modo da poter comprendere facilmente le istruzioni per l'utilizzo dell'allarme stesso.




Fase 1: MONTAGGIO:

Collegare il Jack alla base dell'allarmino assicurandosi di averlo inserito nel verso corretto. Alla base dell'allarmino c'è un'apposita fessura nella quale il Jack entrerà senza bisogno di alcuna forzatura.

Fase 2: POSIZIONAMENTO PER L'UTILIZZO:

Una volta completata la **fase 1**, per poter utilizzare l'allarmino è necessario posizionarlo in maniera che non tiri troppo il filo ed allo stesso tempo che non dia fastidio al bimbo.

Per una maggiore chiarezza e per semplificare la comprensione, l'immagine sottostante indica esattamente le modalità di posizionamento dell' allarmino. Le spiegheremo passo passo:

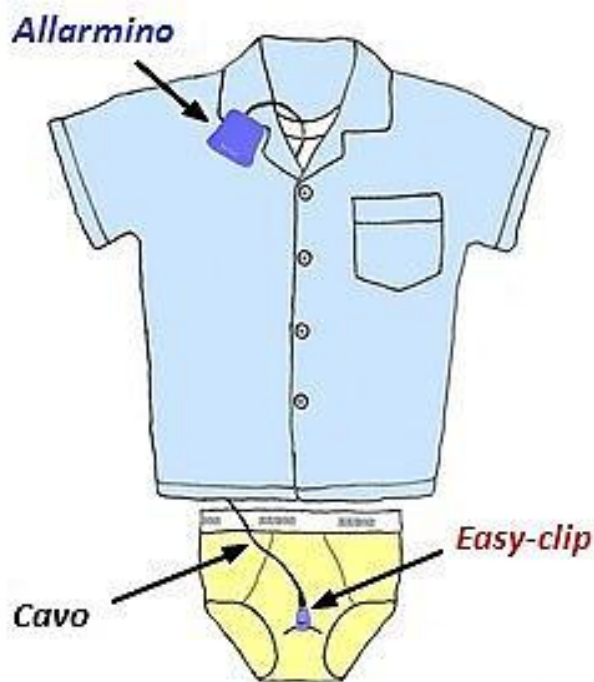

- **L'allarmino va posizionato il più vicino possibile all'orecchio del bimbo, di modo che il suono sia percepito più rapidamente e con intensità maggiore.**

- **Il cavo che collega l'allarme al sensore (ovvero la Easy-Clip) è delicato e deve essere posizionato in maniera tale che non sia tirato al massimo della sua possibile estensione altrimenti si potrebbe incorrere nel rischio di rompere il Jack. Meglio quindi farlo passare all'interno del pigiama.**

- **Il sensore chiamato Easy-Clip ha la forma di una molletta ed al suo interno è dotato di due sensori che sono i responsabili dell'emissione del suono quando il bimbo si bagna. Di conseguenza la**

Easy-Clip va posizionata sulla mutandina del bimbo, nel posto più vicino a dove si bagna.

Ovviamente prima il sensore viene a contatto con il bagnato, prima suonerà l'allarme e meno pipì ci sarà sul letto.

FASE 3: PULIZIA E MANUTENZIONE:

E' importante sapere che quando l'allarmino non è in funzione è sempre meglio tenere la Easy Clip aperta poiché lasciandola chiusa le batterie si esauriscono più rapidamente.

E' necessario lavare il sensore del trasmettitore in acqua calda e sapone e sciacquare sotto l'acqua corrente, agitarlo per far fuoriuscire eventuali depositi di acqua ed infine asciugarlo. Polvere ed urine si depositeranno all'interno del sensore e con il tempo potrebbero ostruire la Easy-Clip, impedendo il contatto con il bagnato e pertanto impedendo che l'allarme funzioni correttamente.

INFORMAZIONI UTILI E GARANZIA.

La batterie sono incluse, nel caso sia necessario sostituirle in futuro, sono poste sul retro dell'allarmino e sono le classiche batterie a bottone.

La garanzia è di un anno a partire dalla data di acquisto, farà fede la data riportata sulla fattura.

Perché l'allarme funzioni correttamente è importante che i genitori aiutino il bimbo a compiere il gesto di alzarsi dal letto per andare in bagno e far pipì poiché con l'aiuto dell'allarmino e con l'aiuto dei genitori, lo stimolo di far pipì sarà riconosciuto dal bimbo ed il gesto di andare in bagno diverrà poi naturale ed automatico.